

如何在耳内测量体温

1 将专用的探头保护套安装到体温计的探头上，然后打开电源。



2 将探头正确插入耳蜗中。



朝耳膜方向，尽可能深地插入耳内。



3 长按开启按钮。
在按住开启按钮的时候，请注意不要移动体温计。
(在正常的模式下，体温计发出蜂鸣声即完成测量。)

测量之前的注意事项

请勿在饮食、运动、入浴或从户外回来30分钟内测量体温。

测量时的注意事项

测量的时候，应保持身体静止不动。

使用耳式体温计的说明

- 耳式体温计测量的是反映身体内部温度的“耳内温”。
- * “耳内温”指的是耳膜及其周边的温度。它反映了身体内部的温度。
- 耳式体温计使用一个传感器即时探测耳内的红外线(IR)，它只需一秒钟即可测量出耳内温度。人体根据体温放射红外线，因此，可以通过探测红外线来测量体温。
- * 耳式体温计只是探测耳内放射出的红外线。自身不放射任何物质，因此对耳朵无伤害。

