



テルモ体温計ラインナップ



おすすめ	商品画像	製品コード	販売名	医療機器承認番号 医療機器認証番号	検温時間	消毒・水洗い	スイッチ	電池交換	バックライト	主な特徴
救急外来		ET-C206E	テルモ 電子体温計 C206	医療機器承認番号 22300BZX00185	予測：平均30秒 実測：●約2分30秒 または測温部の温度変化がわずかとなった場合のいずれが早い時間※1 ●約10分※2	◎ 消毒液可 (裏面参照)	無 ケースからの出し入れで電源ON-OFF	不要	—	・ワキ下用 ・測定範囲 20.0~45.0℃ ・希望小売価格 12,600円 (税抜価格 12,000円)
外来 病棟 薬局・売店		ET-C205S ET-C205H	テルモ 電子体温計 C205	医療機器認証番号 222AABZX00106	予測：平均約30秒 実測：約10分	◎ 消毒液可 (裏面参照)	無 ケースからの出し入れで電源ON-OFF	不要	—	・ワキ下用 ・病院向けスタンダードモデル ・10本まで入るケース有 ・希望小売価格 2,992円 (税抜価格 2,850円)
外来 病棟		ET-C405S	テルモ 電子体温計 C405	医療機器認証番号 222AABZX00129	予測：平均約30秒 実測：約5分	◎ 消毒液可 (裏面参照)	無 ケースからの出し入れで電源ON-OFF	不要	—	・口中、直腸用 ・希望小売価格 2,992円 (税抜価格 2,850円)
外来 病棟 薬局・売店		ET-C231P	テルモ 電子体温計 C231	医療機器認証番号 221AABZX00109	予測：平均約20秒 実測：約10分	○ 水洗い	有	可	○	・ワキ下用 ・前回値メモリー ・オートパワーオフ ・希望小売価格 2,625円 (税抜価格 2,500円)
外来 薬局・売店		ET-C230P	テルモ 電子体温計 C230	医療機器認証番号 221AABZX00108	予測：平均約20秒 実測：約10分	△ 先端のみ水洗い	有	可	—	・ワキ下用 ・一般標準タイプ ・前回値メモリー ・オートパワーオフ ・希望小売価格 2,300円 (税抜価格 2,190円)
老健施設 介護施設 薬局・売店		ET-C220P	テルモ 電子体温計 C220	医療機器認証番号 219AABZX00194	予測：平均30秒 実測：約10分	△ 先端のみ水洗い	有	可	○	・ワキ下用 ・大型液晶、聞こえやすい音で高齢者にも使いやすい ・前回値メモリー ・オートパワーオフ ・希望小売価格 3,675円 (税抜価格 3,500円)
産科・婦人科 薬局・売店		ET-C531PP ET-C531PG	テルモ 電子体温計 C531	医療機器認証番号 222AABZX00107	予測：平均約20秒 実測：約5分	○ 水洗い	有	可	○	・口中用 ・基礎体温測定 ・小数点第2位まで表示 ・前回値メモリー ・オートパワーオフ ・希望価格 2,993円 (税抜価格 2,850円)

※1 腋下の体温が20.0～29.9℃および42.1～45.0℃の場合、または30.0～42.0℃であって予測演算が成立しなかった場合 ※2 腋下の体温が30.0～45.0℃であって、予測温表示後も継続して検温した場合

■テルモ体温計C205、C206、C405を浸漬できる薬剤

分類	有効成分名	販売名	製造販売元	浸漬時間のめやすと濃度
アルコール系	エタノール	消毒用エタノール	東海製薬他	30分/1回 原液
アルデヒド系	グルタラル (グルタルアルデヒド)	ステリハイド 20W/V%液	丸石製薬	1時間/1回 10倍液 (2%)
両性界面活性剤系	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	テゴー 51消毒液 10%	アルフレッサファーマ	30分/1回 100倍液 (0.1%)
第四級アンモニウム塩系 (逆性石けん)	ベンザルコニウム塩化物	オスバン消毒液 10%	日本製薬	10分/1回 100倍液 (0.1%)
		ジアミトール消毒用液10W/V%	丸石製薬	10分/1回 100倍液 (0.1%)
ピグアナイド系	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%ヒピテン液	大日本住友製薬	30分/1回 100倍液 (0.05%)
		マスキン液 (5W/V%)	丸石製薬	30分/1回 100倍液 (0.05%)
塩素系	次亜鉛素酸ナトリウム	ミルトン	杏林製薬	1時間/1回 80倍液
		テキサント消毒液 6%	シオエ製薬	1分間/1回 120倍 (有効塩素濃度0.05%)

※テキサント消毒液6%は、6倍希釈では劣化が早くなります。

■体温計本体を浸漬して消毒する場合

【使用方法】 薬剤に浸漬しての消毒は、上記の使用可能な薬剤にて行ってください。必要な時間だけ薬剤に浸漬した後はすみやかに引き上げ、柔らかい布で水気をふき取り収納ケースに入れて保管してください。


【取扱い上のご注意】 (1) 記載の濃度よりも濃い薬液、あるいは必要時間を超えて浸漬した場合は、本体の劣化が促進される原因となります。(2) 薬剤の添付文書に記載されている、使用上の注意事項および用法・用量に従ってご使用ください。

■収納ケースは長時間浸漬すると銘板ラベルが剥がれる場合があるので、清拭をおすすめします。

テルモの技術が生きているスピード検温式体温計

平均20～30秒で、平衡温を正確に測定。

体温計のパイオニアとして、25年間蓄積された膨大な体温上昇データを基に開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析します。これにより10分後の平衡温を短時間に演算し、平均20～30秒というスピードで正確に検温します。

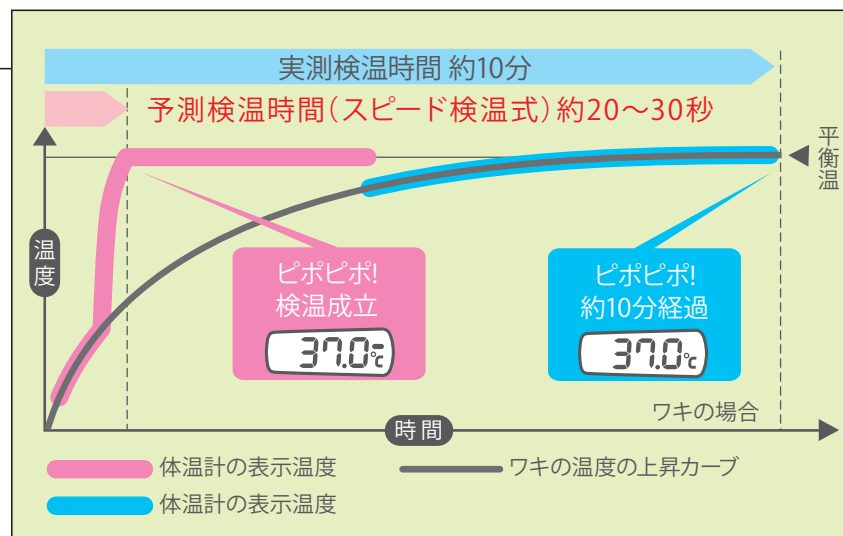

[平衡温とは]

平衡温は、外気温の影響を受けにくい体内の温度。これを実測するためには、ワキをしっかり閉じることで体内の温度が反映された状態をつくる必要があります。通常、平衡温に達するには、ワキを閉じてから10分以上もかかります。

体温に敏感な高感度センサーを搭載。

先端の感温部のセンサーが小さいので、熱応答が良く、体温に敏感に反応します。

